




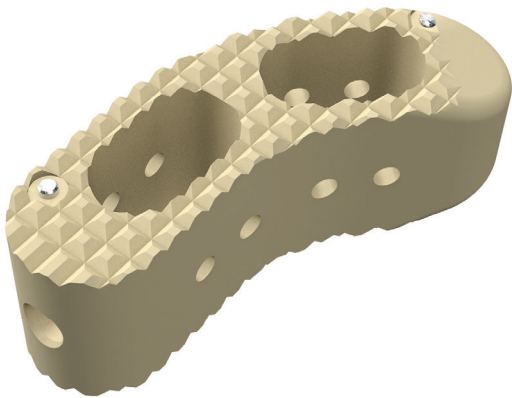

Fusimax[®] TLP

Cage Intersomático Transforaminal

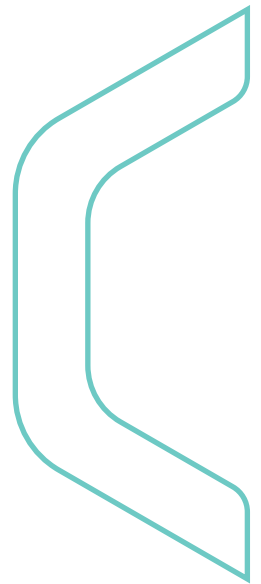

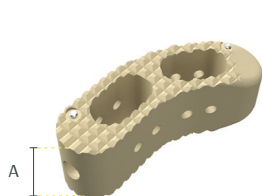

PEEK | Ta

Ref. Nº

A x B x C x D

04.36.27.00008

08 x 8 x 29,2 x 10,7 mm

04.36.27.00010


10 x 8 x 29,2 x 10,7 mm

04.36.27.00012


12 x 8 x 29,2 x 10,7 mm

04.36.27.00014

14 x 8 x 29,2 x 10,7 mm

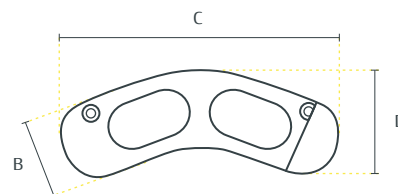


O dispositivo Intersomático conhecido como “Cage” é utilizado para restituir o espaço intervertebral da coluna, conhecido como disco. O cage Fusimax® TLP é um dispositivo lombar com acesso unilateral Intersomático favorecendo menor manipulação das raízes nervosas através de técnica minimamente invasiva, reduzindo o tempo de cirurgia.

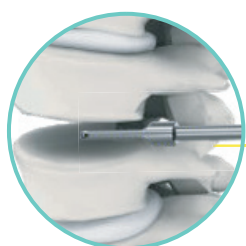



Após a discectomia é feita a distração do espaço discal com a utilização progressiva dos distratores até atingir a estabilização e assim pré-definir a altura do implante a ser utilizado.

Prepare o espaço discal com o uso progressivo das raspas para receber o implante. O Cage deve ser correspondente à maior raspa utilizada.

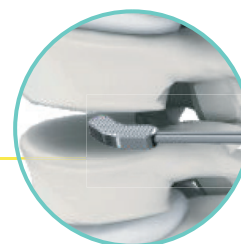

Posicione o Cage conforme indicação gravada na extremidade da chave introdutora.

Proteja a raiz nervosa e saco dural pelo afastador e introduza o Cage.

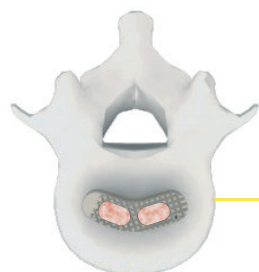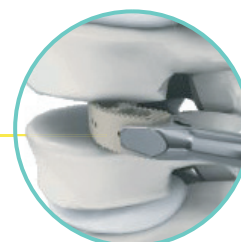

Técnica simples e segura, o cirurgião possui uma menor carga de trabalho diminuindo também o tempo cirúrgico e os riscos intraoperatórios.